


## **PODOPRINT**

ANÁLISIS Y  
COMUNICACIÓN DE  
FORMA PRÁCTICA Y  
SENCILLA

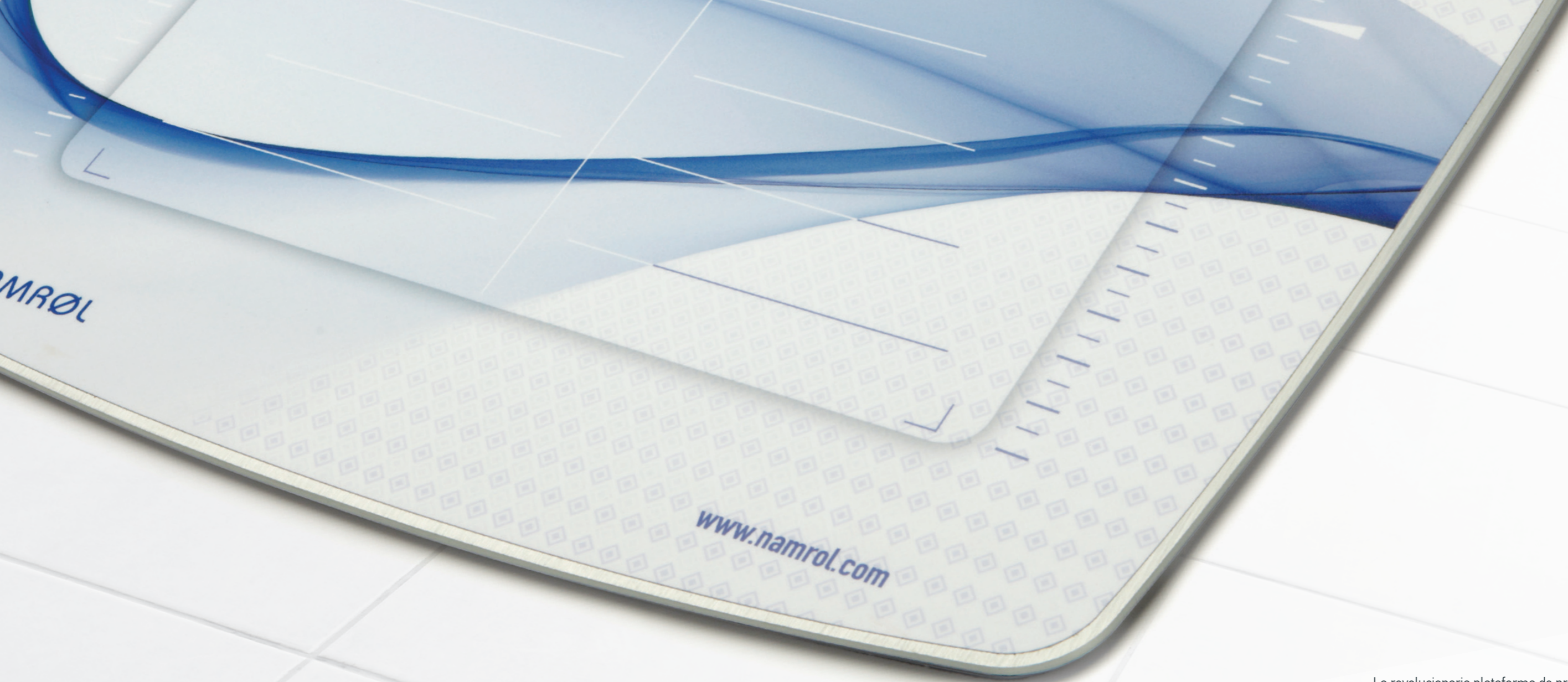

**PODOPRINT**  
EL MODELO MÁS  
LIGERO DE SU  
SEGMENTO, GRACIAS  
ESPECIALMENTE A  
LA UTILIZACIÓN DE  
ALUMINIO PARA LA  
ESTRUCTURA

LA REFERENCIA EN  
PLATAFORMAS DE BAROPODOMETRÍA

La revolucionaria plataforma de presiones Podoprint, permite al usuario realizar completos estudios en estática, dinámica y posturología. De una forma fácil, rápida y precisa.

A.C.M. (AUTO CALIBRATION MODE),  
NO NECESITA NINGÚN TIPO  
DE RECALIBRADO DURANTE  
LA VIDA ÚTIL DE LA  
PLATAFORMA.



## Estática y Posturología

Podoprint permite detallados análisis en estática y posturología.

### Información de análisis de estática:

Cartografía de estática detallada con cálculos por zona, múltiples visualizaciones (termográfica, isopresiones, porcentaje, 3D), comparación de exámenes, valores obtenidos en antepié, retropié, pie izquierdo y derecho, superficies de apoyo, % de carga, centros de presiones de cada pie, proyectación de la línea de carga (centro de gravedad). Captación de media en base a 10 seg. Función Podoscopio.

### Información de análisis de posturología:

Datos numéricos y gráficos de la estabilometría, espectro, trazado. Estudio de las oscilaciones. Estabilo-grama. Gráfico (inestabilidad postural, desviaciones, etc).



## Dinámica

Podoprint permite detallados análisis en dinámica.

### Información de Análisis en dinámica:

Adquisición multi-paso, captación de 200 imágenes por segundo, imagen global dinámica, cálculos, curvas, mosaico de diferentes fases de apoyo, análisis por zona, datos múltiples de tiempo de apoyo y cantidad de carga, video o foto con herramientas de medida.

Gracias a la opción de acoplar una cámara de video, el podólogo podrá estudiar la dinámica sincronizada con las captaciones de la plataforma. También permite el cálculo de ángulos en video o foto.


Sistema de reconocimiento automático del pie derecho o izquierdo con el sistema multipaso.

Se puede usar calzado para un mejor análisis del efecto de la plantilla en el pie.


# Software PODOPRINT

## Intuitivo y Preciso


Compatible con todos los sistemas operativos Windows y Mac \* (\*mediante emulador)  
 Posibilidad de adjuntar cualquier tipo de archivo (Word, Jpeg, PDF , etc.) en un examen de paciente.  
 Permite a los usuarios visualizar, interpretar, modificar e imprimir los exámenes de las presiones plantares de una forma simple e intuitiva.  
 Sistema de copia de seguridad automático.  
 Control remoto desde la aplicación móvil para la adquisición de medidas.  
 Exportación e importación de pacientes entre ordenadores con software Podoprint.  
 Personalización de los informes con el logotipo e información de la clínica.  
 Exportación de cualquier pantalla a PDF y de cualquier análisis en formato video.

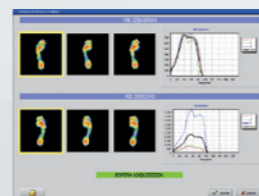


**DINÁMICA**  
Adquisición Multipaso

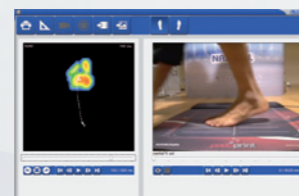


**DINÁMICA**  
Análisis de video sincronizado

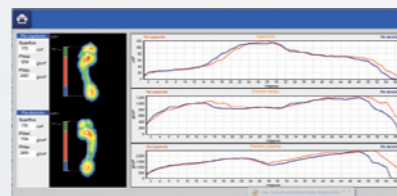


**DINÁMICA**  
Análisis gráfico

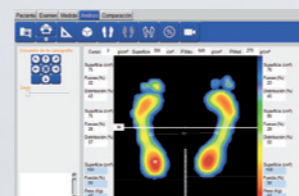


**ESTÁTICA**  
Cartografía estática

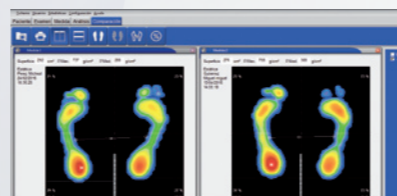

**ESTÁTICA**  
Comparación de exámenes

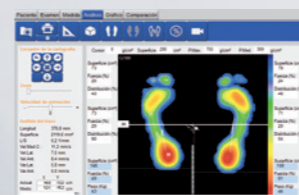

**POSTUROLOGÍA**  
Análisis detallado

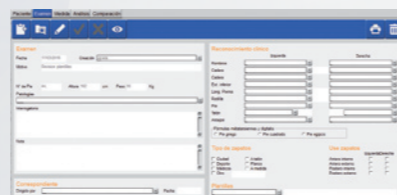


**SOFTWARE**  
Ficha del paciente

# DISEÑADA PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Estructura	Completa en Aluminio
Espesor (zona de trabajo)	4 mm
Superficie activa	400 x 400 mm
Peso	2 Kg
Captore	Resistivos (autocalibrables)
Número de licencias	Sin límite
Grosor del sensor	0,15 mm
Presión mínima/máxima por sensor	de 0,4 N a 100 N
Cable USB	4,5 m. (posibilidad hasta 20 m.)
Conexión PC / Plataforma	USB
Alimentación externa	No precisa
Frecuencia de captura	100 imágenes/segundo
Sistema operativo requerido	Windows 10, XP, Vista...
Opciones	Posicionador de plexiglás Maletín de transporte Software de rehabilitación

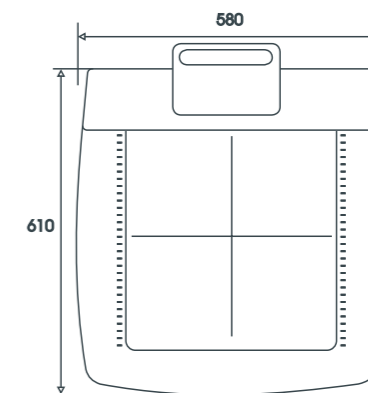

## OPCIONES



Software de rehabilitación

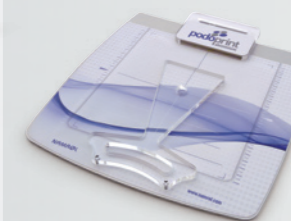

Posicionador para posturología



Maletín de transporte Podoprint

Una amplia red de distribución, con delegaciones y servicio postventa, nos permite llegar a todo el territorio nacional. Asegurando el mejor asesoramiento de nuestros productos y garantizando el mejor servicio.



#### FÁBRICA Y DELEGACIÓN

C/. Drets Humans, 17-19  
08870 Sitges (Barcelona)  
e-mail: info@namrol.com



#### DELEGACIÓN LEVANTE

Pza. Profesor Tamarit Olmos, 20  
Local 12  
46010 Valencia  
e-mail: ventasl@namrol.com



#### DELEGACIÓN CENTRO

C/. Puenteáreas, 13  
28002 Madrid  
e-mail: ventasm@namrol.com



#### DELEGACIÓN SUR

C/. Juan Sebastián Elcano, 15  
41011 Sevilla  
e-mail: ventasa@namrol.com



#### DELEGACIÓN NORTE

Avda. Pedro Masaveu, 9  
33007 Oviedo  
e-mail: comercial@namrol.com

*Siempre cuidamos  
lo que fabricamos*

**Postventa  
Namrol**

**Namrol Info**  
**902 374 747**  
venta directa a toda España

[www.namrol.com](http://www.namrol.com) 